

Le port du masque

FFP2 & FFP3

METTRE LE MASQUE



1 Avant de mettre le masque, lavez vos mains au savon liquide ou désinfectez au produit hydroalcoolique



2 Placez le masque dans votre paume avec les liens élastiques vers le bas



3 Placez-le sur votre menton, puis tirez-le jusqu'à votre nez



4 Positionnez l'élastique du bas derrière votre nuque et l'élastique supérieur au-dessus des oreilles



5 À l'aide de vos index, pincez la barrette située sur le haut pour ajuster le masque et assurer son étanchéité


ENLEVER LE MASQUE



1 Retirez les gants sales



2 Enfilez des gants propres

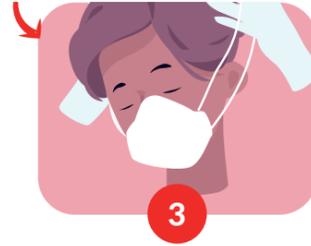

3 Pour enlever le masque, prenez les liens élastiques à l'arrière de votre tête



4 Jetez-le dans une poubelle fermée



5 Enlevez les gants et jetez-les



6 Lavez vos mains au savon liquide ou désinfectez au produit hydroalcoolique



Le masque FFP2 ou FFP3 est à usage unique sauf s'il a été intégralement protégé par un masque chirurgical ou par une visière. Dans tel cas, et uniquement dans ces cas, il peut être gardé jusqu'à 3 x 8 heures pour autant qu'il a été conservé dans une pochette plastique propre et hermétique, à l'abri de toute contamination entre 2 activités.

Quand le porter

En ambulance, en présence d'un cas suspect d'une infection à Covid-19, le masque FFP2 est toujours porté avec une combinaison

Quand le jeter

Si vous touchez accidentellement le devant du masque pendant que vous le portez, lavez vos mains au savon ou au produit hydroalcoolique. Si votre masque devient **mouillé ou humide**, remplacez-le par un nouveau masque.

Attention : Les patients suspects ou confirmés de Covid-19 ne sont pas équipés de masques FFP2 ou FFP3 mais de masques chirurgicaux.

En cas de doute, référez-vous aux normes de votre activité

